


NOTICE D'UTILISATION

RACCORD LUER LOCK* ET SERINGUE PRÉ-REMPLE DE POUDRE D'OS BIOBANK

* Le raccord Luer lock est un dispositif médical stérile
fourni comme accessoire

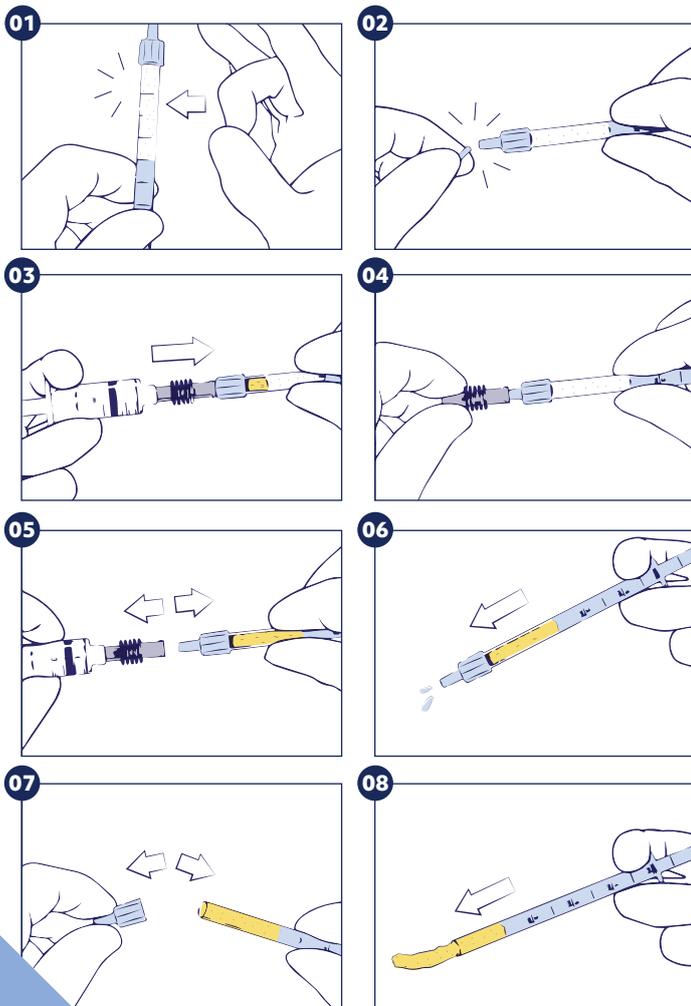

- 01** Reculer le piston (≈ 0,25 ml) et **tapoter la seringue** pour décompresser la poudre
- 02** **Casser la pointe** sécable du bouchon
- 03** **Connecter le raccord** Luer lock fourni à la seringue de poudre
- 04** Connecter une seringue remplie d'une solution stérile de **chlorure de sodium à 0,9 %**. **Transférer aseptiquement le liquide jusqu'au piston** pour hydrater entièrement la poudre
- 05** **Déconnecter** la seringue BIOBank
- 06** **Attendre** quelques minutes puis **expulser l'excédent de liquide** en poussant sur le piston
- 07** **Enlever le bouchon**
- 08** **Pousser sur le piston** pour introduire la poudre d'os BIOBank réhydratée dans le site de greffe